


Derma Sol Plus

Zum einfachen Entfernen von Haftmaterialien von der Haut

230 ml

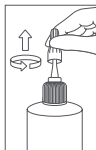

siehe Boden



siehe Boden

LOT



Gebrauchsanweisung

Indikation: Entfernen von Stomaversorgungen und anderen medizinischen Haftmaterialien von der unversehrten Haut. Derma Sol Plus trocknet in kurzer Zeit. Die Haftfähigkeit der nachfolgenden Versorgung wird nicht beeinträchtigt.

Anwendung: Zum Öffnen der Flasche die türkise Verschlusskappe von der Spritztülle drehen und abziehen. • Verwenden Sie die Spritztülle oder eine Kompresse. Lösen Sie das Haftmaterial mit einer geringen Menge Derma Sol Plus gezielt an. Dann das Haftmaterial behutsam von der Haut abrollen und eventuelle Reste abwischen. **Zusammensetzung:** Hexamethyldisiloxan **Wichtige Hinweise:** Nur zur äußeren Anwendung. • Nicht im Wundbett, im Augenbereich und auf Schleimhäuten anwenden. • Mit der Spritztülle nicht die Haut berühren. **Vorsicht:** Nicht empfohlen für Frühgeborene/Kinder unter 2,4 kg Körpergewicht.

Sicherheitshinweise: Kühl an einem gut belüfteten Ort lagern. • Flasche dicht verschlossen halten. • Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. • Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • Freisetzung in die Umwelt vermeiden. • Inhalt nicht ins Abwasser oder in die Toilette schütten, zur Entsorgung ggf. bei der kommunalen Sammelstelle abgeben. • Leeren Behälter der Wertstoffsammlung zuführen.

Stand: November 2022



Artikel-Nr. 9110 PZN: 16233657

MD

MEDIZINPRODUKT

Coloplast GmbH
Am Neumarkt 42
22041 Hamburg

